



Tuotenumero 1000021167

ABENA®

Vaipat, ABENA Slip Flexi Fit, L-XL4, violetti värikoodi, Premium

- ✓ Joustava ja napakka istuvuus sopii kaikille vartalotyypeille
- ✓ Helppo pukea
- ✓ Tukee ihon terveyttä
- ✓ Imukykyinen ydin
- ✓ 360 asteen vuotosuojaus



Tuotekuvaus

ABENA Slip Flexi Fit on Premium-luokan täysin hengittävän teippivaipan joustava versio keskivaikeasta vaikeaan inkontinenssiin. Joustavat sivut vyötäröllä ja kuminauharypytyt alaselässä antavat napakan ja mukavan istuvuuden, joka mukautuu kaikenlaisten vartaloiden muotoon ja antaa korkean suojan myös liikuttaessa. Imukykyisen ytimen Top-Dry-teknologia varmistaa ihon hyvinvoinnin pitämällä altistuneen ihoalueen miellyttävän kuivana useamman virtsaamiskerran jälkeenkin. Näkyvät ja näkymättömät vuotosuojat ja joustavat jalantiet antavat yhdessä kattavan 360 asteen suojan vuotoja vastaan. Nämä kaikki ominaisuudet suojaavat ihoa ja ylläpitävät ihon luonnollista pH-tasapainoa. Laadukkaat kaksoisteipit takaavat optimaalisen istuvuuden ja helpon uudelleenkiinnityksen. Hajunsulkujärjestelmä minimoi epämiellyttävät hajut. Täyttöasteikolla varustettu kosteusindikaattori auttaa käyttäjää ja hoitajaa valitsemaan imukyvyltään oikean tuotteen ja helpottaa vaihtovälin arviointia. Dermatologisesti testatuille tuotteille on myönnetty Joutsenmerkki.



Tuoteominaisuudet

Lyhyt nimi	Vaipat
Brändi	ABENA
Alabrändi	Slip Flexi Fit
Koko	L-XL4
Väri	Valkoinen
Ominaisuudet	Violetti värikoodi
Materiaali	ECF fluff, PE, BTBS, elastaani, kuitukangas, polypropeeni, hartsi, SAP
Pituus/syvyys	970 mm
Leveys	800 mm
Lantionympärys	110-170 cm
Toleranssi	+/- 10%
Rothwell-imukyky	3800 ml
Sukupuoli	Unisex
Laatu	Premium
Todistukset	CE. MD. Joutsenmerkki. UKCA.
Joutsenmerkki, lisenssinumero	5023 0001
CE-luokka	Class I

Tuote- tai testistandardit	ISO 13485, ISO 9001, ISO 11948-1, ISO 14001
Direktiivit, asetukset ja säädökset	MDR (EU) 2017/745
Turvallisuusohjeet ja varoitukset	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Tuotteen koostumuksesta johtuen sillä on viimeinen käyttöpäivä, joka on laskettu valmistuspäivästä alkaen:	5 vuotta
Säilytysohjeet	Säilytä kuivassa, huoneenlämmössä ja ilman suoraa auringonvaloa.
Tuotteen hävittämishojeet	Voidaan hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana paikallisten määräysten mukaisesti lajiteltuna.
Pakkauksen hävittämishojeet	Voidaan kierrättää tai polttaa.

Käyttöohjeet

Keskivaikeaan ja vaikeaan inkontinenssiin tarkoitettu teippivaippa erittäin vaativiin tilanteisiin ja vuodepotilaille. Tuotteen koon tunnistaa värikoodien, nimien ja numerointijärjestelmien avulla. Oikea koko valitaan lantion ympärysmittaan mukaan, joten se on tärkeä mitata. Sopiva imukyky ehkäisee ohivuotoja. Muotoile vaippa pituussuunnassa taustapuoli ulospäin niin, että keskelle syntyy kouru. Pujota suoja jalkojen väliin edestä taaksepäin. Levitä vaippa jalkojen väliin suppilomaiseen muotoon levittämällä vaippaa edestä. Kiinnitä ensin alemmat teipit viistosti ylöspäin molemmilta puolilta. Kiinnitä sitten ylemmät teipit kummaltakin puolelta alaviistoon niin, että vaippa on mukavasti ja kehonmyötäisesti. Voit pukea tuotteet joko pystyasennossa (sekä omatoimisesti että avustettuna) tai makuuasennossa. Katso lisätietoja esitteessämme olevasta pukemishojeesta.

Pakkaustiedot

Yksikkö	Sisältää	Pituus	Leveys	Korkeus	EAN
ltk	4 pkt	61.6 cm	40 cm	36.7 cm	5713571001592
pkt	18 kpl	37 cm	17.5 cm	29 cm	5713571001585



Pohjoismainen Joutsenmerkki on virallinen pohjoismainen ympäristömerkki. Joutsenmerkillä varustetut tuotteet täyttävät tiukat ympäristövaatimukset raaka-aineiden, tuotannon, käytön, dokumentoinnin ja turvallisuuden osalta.



MD-merkinnällä varustetut tuotteet luokitellaan lääkinnällisiksi laitteiksi.



CE-merkintä takaa, että tuotetta on turvallista käyttää ja että sillä voidaan toteuttaa kaikki turvatoimenpiteet. CE tarkoittaa Conformité Européenne (EU-vaatimustenmukaisuus) -standardia. Sitä käytetään pääasiassa elektroniikkalaitteille, turvalaitteille, rakennusalan tuotteille ja lääkinnällisille laitteille.



UKCA-merkki osoittaa, että tuote on turvallinen käyttää, ja että se noudattaa kaikkia tuotestandardien ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön mukaisia turvatoimia.



Haaraosassa ja imukykyisen ytimen ympärillä olevat vuotosuojat ehkäisevät ohivuotoja ja varmistavat optimaalisen istuvuuden.



Takaa, että tuotteemme on testattu sellaisten ainesosien varalta, jotka voivat aiheuttaa ihoärsytystä. Testit on suorittanut riippumaton kolmannen osapuolen laboratorio.



Joustaviin sivupaneeleihin on lisätty kuminauhut pukemisen helpottamiseksi. Tiivis ja varma istuvuus, sopii kaikenmuotoisille vartaloille.



Ainutlaatuinen imukykyinen ydin imee ja lukitsee virtsan nopeasti, minkä ansiosta tuotteen pinta pysyy kuivana useamman virtsaamiskerran jälkeenkin.



Hajujensitomisoimaisuus on tärkeä tekijä huomaamattomuuden varmistamiseksi. ABENA-inkontinenssituotteet on suunniteltu ja valmistettu minimoimaan epämiellyttävät hajut mahdollisimman hyvin.



Kosteusindikaattori on nesteeseen reagoiva nauha, joka vaihtaa väriä tai haalistuu, kun on aika vaihtaa tuote.



100-prosenttisen hengittävyiden, Top-Dry-ominaisuuden ja vuotosuojan yhdistelmä pitää tuotteen pintakuivana ja ihoystävällisenä jopa useamman virtsaamiskerran jälkeen ja säilyttää ihon luonnollisen pH-tasapainon.



Täysin hengittävä tuote on miellyttävä myös pitkäaikaisessa käytössä. Auttaa ylläpitämään ihon terveyttä.



Ainutlaatuinen Top-Dry-teknologia takaa nopean imeytymisen ja pitää tuotteen pinnan kuivana jopa useamman virtsaamiskerran jälkeen.



Tippamerkinä ilmaisee tuotteen imukykyä. Mitä enemmän tippoja on, sitä korkeampi on imukyky. Imukyky määrä voi olla 1–9 tippaa.



Ei sisällä lateksia.



Pussi on 30-prosenttisesti PCR-muovia eli valmistettu kuluttajien kierrättämästä muovimateriaalista. Näin voimme vähentää muovijätteen määrää ja auttaa pitämään huolta ympäristöstä.

